

ZeptAir

Преносима Аерозолна Терапия



zepter
INTERNATIONAL
LIVE BETTER • LIVE LONGER


Портативен мрежест пулверизатор

ZeptAir е иновативен, ултразвуков, мрежест пулверизатор, който осигурява **ефективно, портативно, подръчно лечение** за постоянно увеличаващия се ръст на **деца и възрастни с хронични респираторни заболявания** като **астма, бронхит, ХОББ и пневмония**.

Тази **ултраефективна терапевтична система** има висока скорост на пулверизиране и доставя до **0.9 мл** лекарство в минута, осигурявайки **кратки и ефективни** аерозолни процедури. Така се осигурява бърза доставка на лекарството и по-малка загуба на медикамента.



Бели дробове

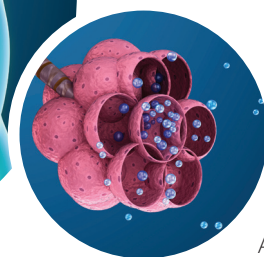

Алвеоли

Иновативният Микромрежест диск ZeptAir вибрира с ултразвукова скорост, произвеждайки нано-аерозолни частици, които незабавно достигат бронхите вместо да се задържат в горната част на дихателната система и по този начин **директно повлияват за елиминиране причината за инфекцията**.

Ултраефективна система за аерозолна терапия

Новата мрежеста технология

създава свръхфини, дълбокопроникващи аерозолни частици с **ММAD по-малък от 5 микрометра**, които проникват дълбоко в дробовите.



С нисък шум

бързо атомизира частиците, осигурявайки **тихо** и **удобно** третиране.



С малък размер

Тежи само **108гр.**, което го прави удобен за носене и ползване навсякъде и по всяко време, само с една ръка.



Работи на батерия

за лесна употреба дори в движение.



Характеристики



- 1 Капак
- 2 Чашка за лекарство
- 3 Пръскаща дюза
- 4 Бутон за включване
- 5 Увеличаване на пулверизация
- 6 Намалване на пулверизация

- 7 Главно тяло
- 8 Бутон "Press"
- 9 USB вход за зареждане
- 10 Мундщук
- 11 Маска

Режим на работа

Устройството има 2 режима: **непрекъснат** и **при поискване**.

Изберете **“Micro-wave”** режим като натиснете **бутона за включване** за 3сек. и за автоматична настройка на скоростта на пулверизиране според скоростта на дишане.

Честотния режим при поискване позволява ръчно регулиране. Превключвайте между 2 режима като натискате **бутона за включване**. За персонализиране на скоростта на пулверизиране изберете **“+”** или **“-”** **бутоните**.

Чашка за лекарство

Сменяема и разглобяема чаша с вместимост на течен разтвор **10 мл**. Може да се ползва с всякакви течни разтвори (лекарства).

Бутон за включване

Незабавна терапия с натискането на един бутон.

Мундщук и маска

Преносимият пулверизатор Zepter може да се ползва от всички възрастови групи с **мундщук** или **маска** за максимално удобство. Лесно може да се ползва от деца, защото им позволява да играят (на настолна игра) или да четат, докато атомизираното лекарство се доставя към белите им дробове.

USB зареждане

Времето за зареждане е около **2 часа, 60 минути** е **непрекъснатата употреба** след пълно зареждане, което позволява прилагането на множество терапии с едно зареждане.

LED-индикаторни светлини за изтощена батерия

Дишай **Лесно**, Дишай **Здравословно**

Да имаш **преносим, лесен за ползване** пулверизатор, който предлага облекчение при необходимост **в най-кратко време**, значително ще подобри живота Ви, правейки Ви свободни да се наслаждавате максимално на всеки миг.

Където и да сте - в училище, на работа, в самолет, докато се наслаждавате на разходка или сте в движение - **ZeptAir микрорежест пулверизатор** ще Ви помогне да възстановите контрола върху живота си.



ZeptAir е идеалното решение за **възрастни пациенти**, които имат затруднения с използването на традиционни пулверизатори.

Това **малко и компактно решение** осигурява ефективно лечение за цялото семейство, **по всяко време и навсякъде**.



Zepter Портативен Мрежест Пулверизатор в комбинация с Hyperlight Fluid Fusion подклетъчен етеричен комплекс

В комбинация с Hyperlight Fluid Fusion подклетъчен етеричен комплекс, преносимият мрежест пулверизатор на Zepter осигурява терапия полезна за цялото тяло, особено за дихателната система. Ако се използва редовно, той помага да се създаде силен имунен отговор и непробиваема бариера срещу патогени, инфекции, всички бактерии и вируси.



Научете повече за най-новата патентована технология на Zepter: Hyperlight подклетъчен етеричен комплекс



София
бул. "Княгиня Мария-Луиза" 47, етаж 2,
тел.: (02) 988 44 58
clients@zepter.bg